



● Distribuzione
di articoli biomedicali

● Gestione degli acquisti
e dei magazzini VMI

● Ricerca e Sviluppo
prodotti

● Servizi di consulenza
logistica e produttiva



Gentile cliente, grazie per aver scelto il nostro test per allergie.

Nella convinzione di offrire un servizio migliore ecco qualche indicazione o risposta alle domande che più frequentemente ci vengono poste!

- o Il test viene fornito in kit, completo di tutto tranne un cronometro e un recipiente, tipo bicchiere, per i liquidi residui.
- o Per un utilizzo ottimale del test è molto importante seguire tutti i passaggi delle istruzioni. Per quel che riguarda i tempi di incubazione è meglio aspettare di più rispetto al tempo prescritto, ma mai di meno! Sia nei pre-lavaggi sia nei lavaggi consigliamo di spingere con decisione la soluzione fisiologica. Tra un lavaggio e l'altro aspettare 5 minuti! Nell'ultima fase, quella di sviluppo del test, rispettare rigorosamente il tempo di 5 minuti!
- o Nonostante i test debbano essere mantenuti ad una temperatura di 4°C per essere garantiti un anno, la procedura ideale prevede che vengano portati a temperatura ambiente prima di essere effettuati (mezz'ora prima). Questo rende più facile la lettura del risultato (positivo, negativo o border line).
- o Durante la preparazione del test, è importante non toccare con le mani la membrana! Nel caso debba essere leggermente spostata per fare in modo che sia posizionata correttamente, usare la pipetta in dotazione.
- o Per effettuare il test si può usare qualsiasi tipo di sangue capillare, siero, etc.). Per il prelievo del sangue è consigliabile pungere il polpastrello del dito e tenerlo in posizione bassa, sotto il livello del cuore. Appoggiare la pipetta alla goccia di sangue in posizione orizzontale, in modo che il sangue venga aspirato per capillarità.



● Distribuzione
di articoli biomedicali

● Gestione degli acquisti
e dei magazzini VMI

● Ricerca e Sviluppo
prodotti

● Servizi di consulenza
logistica e produttiva

- Prima di versare il mix sangue-soluzione test sulla membrana, precedentemente inumidita con la soluzione fisiologica, eliminare accuratamente l'eventuale liquido in eccesso presente sulla membrana stessa.
- Per il risciacquo finale si può usare sia acqua distillata sia normale acqua del rubinetto.
- La lettura del risultato deve essere effettuata da subito, ma in ogni caso il risultato è valido anche a distanza di qualche ora. Tuttavia, un'attesa eccessiva nella lettura rischia di fornire dei falsi positivi; pertanto, è sempre consigliabile non attendere troppo.
- Nel test alimentare sono presenti due "mix" con la seguente composizione:
 - "mix di carni": pollo, maiale, manzo.
 - "mix di pesci": merluzzo, aringa (sardina), sgombro e sogliola (passera di mare).
- Nel test respiratorio è presente un "mix di pollini da erba" (GRAMINACEE) composto da: paleino odoroso, lolierella, coda di topo, segale e bambaggione.

Per qualsiasi altra informazione siamo contattabili via mail all'indirizzo: info@project-italia.it o telefonicamente ai numeri: (+39) 059 244398, (+39) 347 2253857 - 346 8659299

PROJECT srl